

STEP-HEAR™ Basenhet SH-200

Handledning

Svensk



**NAVIGATION OCH INFORMATIONSSYSTEM
För synskadade och blinda**

Innehåll

Innehåll 2
INTRODUKTION 3
BESKRIVNING 4
BESKRIVNING 5
INSTALLATION 6
Använda Basenheten 7
ALTERNATIV 11
FELSÖKNING 12
SÄKERHETSINFORMATION 13
GARANTI (EU) 13
GUARANTEE (USA) 14
IC Declaration (Canada) 15
Materialåtervinning 15

INTRODUKTION

Gratulerar till köpet av din STEP-HEAR™ basenhet. STEP-HEAR™-systemet består av två enheter: en väderbeständig utomhus sändare / bas och en liten mottagare / aktivator. Efter installation skickar basen ut en kontinuerlig signal. När aktivatorn, som innehas av användaren, är inom området för basen, vibrerar den och avger en signal. Genom att trycka på en knapp på aktivatorn utlöser en förinspelad röst meddelande från basen. Detta ger information som hjälper användaren att hitta sin destination.

Basen har också en funktion som gör att volymen ökas eller minskas automatiskt beroende på nivån på omgivande ljud. Det är viktigt att du läser instruktionerna nedan för att använda STEP-HEAR™ - systemet till sin fulla potential. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida referens.

Denna guide förklarar hur du använder
STEP-HEAR™ Basenhet

SH-200

Packa upp basenheten


Efter upppackning av basenheten hittar du följande innehåll i kartongen:

- 1 Basenhet med strömkabel
- 1 Väggfäste med skruvmejsel och skruvar
- 1 Användarhandbok




För support och hjälp besök vår webbplats på
www.icap.nu eller www.step-hear.com

BESKRIVNING

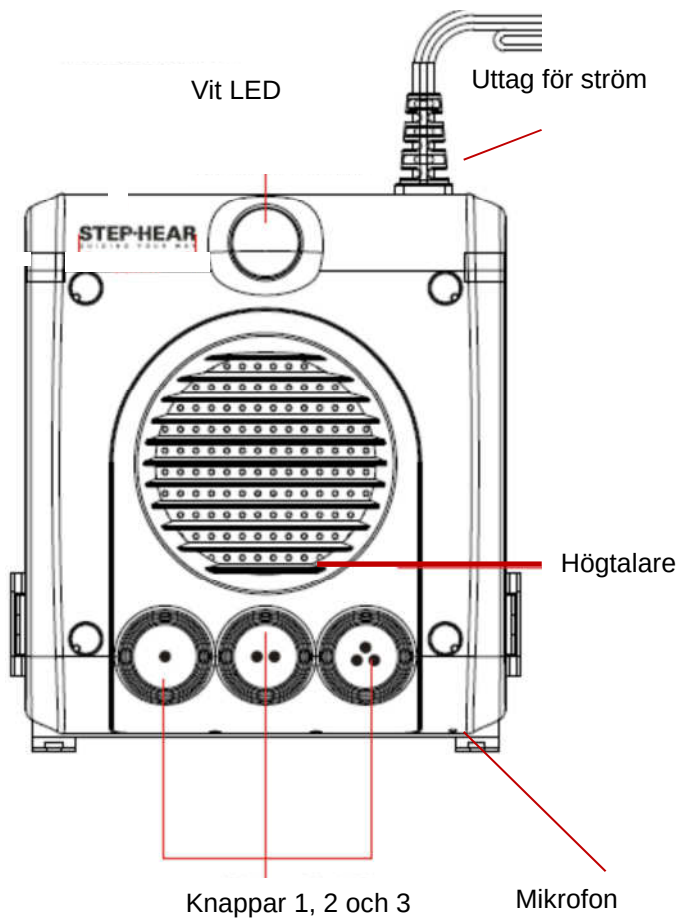


BESKRIVNING

Basenhetens ovansida

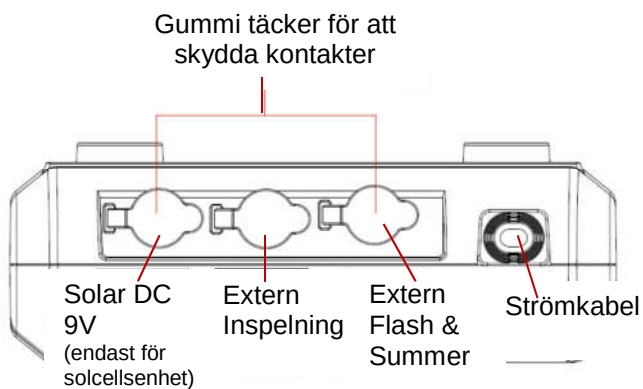

Basenhetens baksida

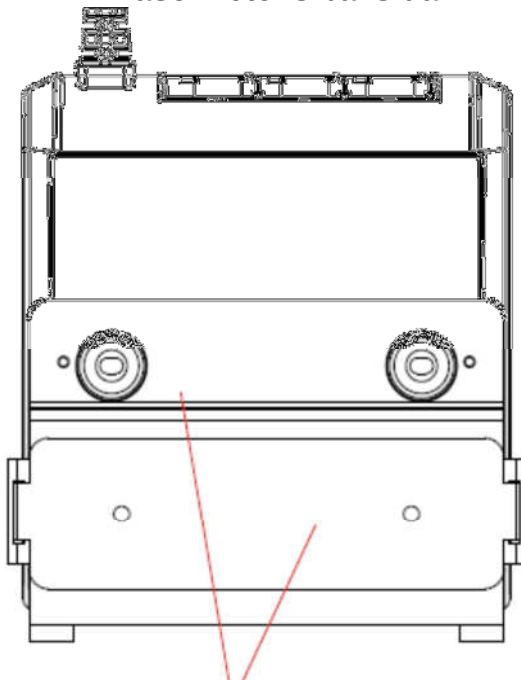


Metall väggmonteringsfäste

INSTALLATION

Väggmontering

SH-200 är lämplig för väggmontering.

Observera: Använd den medföljande skruvmejseln. Det är den enda typ av skruvmejsel som kommer att fungera med de medföljande skruvarna.

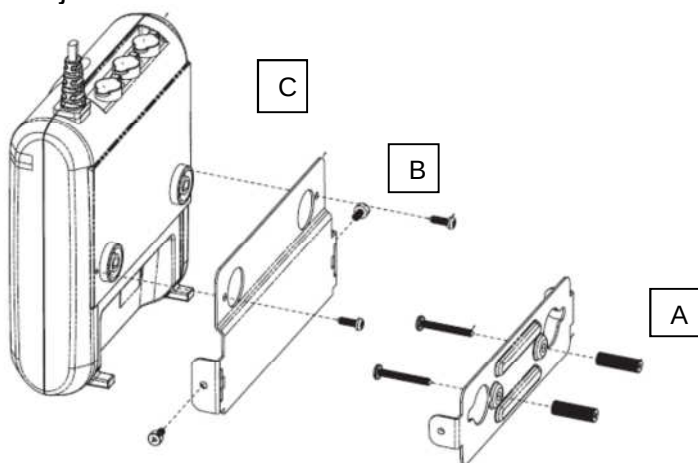

- 1) Fäst väggmonteringsplattan (A) på väggen på din valda plats med två skruvar och pluggar för vägg (medföljer).
- 2) Skruva fästplattan (B) på basenheten (C).
- 3) Klicka på basenheten (med fästplattan) på väggmonteringsplattan. Sätt två skruvar (medföljer) för att fästa. Det bör passa på ett tätt och säkert sätt.

Använda Basenheten

Inställning Standby På/Av

Om du vill ställa in basen i standby dvs. att den inte ska användas under en längre tid, tryck och håll knapparna 1 och 3 tillsammans i 2 sekunder. Den vita lysdioden blinkar tre gånger. För att slå på strömmen igen och fortsätta RF överföring, tryck på valfri tangent.

Ställa in fjärrkontrollens räckvidd

Det finns 3 olika driftområden som aktivatorn kan plocka upp en signal. Dessa intervall, under idealiska förhållanden är följande:

Kort - 3-5 m

Medel - 5-7 m

Lång - 7-9 m

Standardinställningen är medel - 5-7 m. För att aktivera området, tryck och håll knapparna 1 och 2 tillsammans i 2 sekunder. Den vita lysdioden tänds. Ge en kort tryckning på en av de 3 knapparna för att välja det aktuella intervallet som krävs:

Knapp 1 - 3-5m

Knapp 2 - 5-7m

Knapp 3 - 7-9m:

För att avsluta inställningen, tryck och håll knapparna 1 och 2 tillsammans i 2 sekunder.

Observera: Dessa intervall är ungefärliga som intervall kan variera beroende på faktorer såsom omgivande temperatur, fuktighet, fri sikt mellan basen och aktivatorantenn.

Inställning Inspelning På/Av

Att gå in inspelningsläge, tryck och håll knapparna 2 och 3 tillsammans i 2 sekunder. Den vita lysdioden blinkar en gång när inspelningsläget är på och två gånger när inspelningsläget är avstängt.

Spela in ett meddelande

Det finns 2 metoder för inspelning:

- Direkt inspelning
- Inspelning via en extern ljudenhet

Direkt inspelning

Enhetens mikrofon sitter på framsidan av enheten i det nedre högra hörnet (ett litet runt hål). För bästa inspelningsresultat bör mikrofonen hållas nära dig när du spelar in meddelandet.

Du kan spela in 3 olika meddelanden genom att trycka på alla knappar (1,2 eller 3). För att spela in meddelande nr 1, tryck på och håll knappen 1. Tala tydligt när du hör en ljudsignal och håll knappen 1 intryckt så länge du spelar in. När du är klar med inspelningen släpper du knapp 1 - basenheten kommer spela det inspelade meddelandet automatiskt.

Upprepa samma process med knappar 2 och 3 om du vill spela in meddelanden 2 respektive 3.

Du kan trycka på knapp 1, 2 eller 3 när som helst och lyssna på meddelanden. Den vita lysdioden blinkar under uppspelning.

Totalt finns det 10 minuters inspelningstid, som kan delas mellan en, två eller tre olika meddelanden. Till exempel kan Knapp 1 ha ett tillkännagivande på 1,5 minuter, knapp 2 har ett tillkännagivande av 4,5 minuter och knapp 3 har då ett meddelande för återstoden av den återstående tid som är 4 minuter.

Om du vill ändra något meddelande, se till att det nya inspelade meddelandet inte överstiger totalt 10 minuters

inspelningstid som är tillgänglig för alla registrerade meddelanden.

VIKTIGT: Innan nyinspelning av ett meddelande kan du radera tidigare inspelade meddelandet. För att radera meddelandet 1, tryck och håll knapp 1 och släpp den omedelbart när ett pip hörs.

Upprepa detta steg för knapp 2 och 3 om du vill radera meddelanden 2 respektive 3.

Tänk på att kvaliteten på inspelningarna, förutsätter att innehållet i information och plats för installation av basenheter är avgörande för framgångsrik användning av STEP-HEAR™-systemet. När du installerar STEP-HEAR™-systemet, ta hänsyn till följande:

1. Spela in meddelanden i en lugn miljö utan bakgrundsljud.
2. Bestäm noggrant ett antal strategiska installationspunkter för basenheterna i det utvalda området.
3. Meddelandet måste vara relevant och passande till området oberoende av vilken riktning man kan närma sig, särskilt om riktning ges. Om du använder termerna. "Vänster" "Höger", använd basenheten som en referenspunkt (t.ex. - "När du står framför rösten, är hissarna 10 meter till vänster").
4. **Observera:** basenheter bör installeras minst 20 meter från varandra.

Ställ inspelningsläget på **OFF** efter att du har spelat dina meddelanden. För att göra detta, tryck och håll knapparna 2 och 3 tillsammans i 2 sekunder. Den vita lysdioden blinkar två gånger när inspelningsläget är avstängt.

Step Hear Ltd ansvarar inte för innehållet i röstmeddelanden eller andra inspelningar spelas upp från Step Hear baser. För allt innehåll som spelas in på basenheten ansvarar basens användare.

Spela ett meddelande via en extern ljudenhet

Anslut ljudkabeln till det externa inspelningsuttaget som hittas ovanpå basen.

Håll och tryck knapparna 2 och 3 i 2 sekunder för att aktivera inspelningsläget. Den vita lysdioden blinkar en gång när inspelningsläget är på och två gånger när inspelningsläget är avstängt.

Tryck och håll knapp 1, 2 eller 3 och slå på ljudenheten när du hör en ljudsignal för att börja spela in ljudet från ljudenheten (t.ex. en iPod, iPhone, MP4 etc.). Håll knapp 1, 2 eller 3 intryckt så länge du spelar in.

När du är klar med inspelningen släpper du knappen 1, 2 eller 3 - basenheten kommer spela det inspelade meddelandet automatiskt.

Du kan trycka på knapp 1, 2 eller 3 när som helst för att lyssna på meddelanden. Den vita lysdioden blinkar under uppspelning.

Observera: Ställ in inspelningsläget på **OFF** efter att du har spelat in ditt meddelande. För att göra detta, tryck och håll knapparna 2 och 3 tillsammans i 2 sekunder. Den vita lysdioden blinkar två gånger när inspelningsläget är avstängt.

För att ändra och / eller ta bort meddelanden, vänligen använd enheten enligt instruktionerna i direkt inspelning.

Ställa in volymkontrollen

Uppspelningsvolymen kommer att justera automatiskt beroende på ljudnivån i den omgivande miljön. I en bullrig miljö, kommer volymen sättas mycket högre än i en lugnare miljö. Du bör dock justera dessa standardinställningar som definieras för båda alternativen (hög och låg ljudnivå) i 3 nivåer som anges nedan:

När ett meddelande som spelas upp i en bullrig miljö, använd knappen 1 när meddelandet spelas upp för att ställa

nivån på uppspelningsvolymen. Det finns 3 nivåer på volymen.

Medan meddelandet spelas upp, tryck på knapp 1 gång - volymen är 1, tryck två gånger - volymen är 2, tryck tre gånger - volymen är 3. Om du trycker på knappen 1 igen, kommer volymen tillbaka till 1. För att kontrollera den aktuella volyminställningen, spela upp röstmeddelande genom att trycka på knapp 1, 2 eller 3 för varje inspelat meddelande.

När ett meddelande ska spelas upp i en lugn miljö, använd knapp 3 när meddelandet spelas upp för att ställa uppspelningsvolymens nivå. Det finns 3 nivåer på volymen. Funktionen är densamma som för volyminställning i en bullrig miljö.

Det rekommenderas att ställa in volymen på nivå 3 (den högsta nivån) för varje inspelat meddelande och på båda knapparna 1 och 3), så att den högsta nivån av volym kommer att höras i både bullriga och tysta miljöer.

ALTERNATIV

Backup Batteripack

Det finns ett alternativ för inköp av ett internt backupbatteri, som kommer att fungera som kraftkälla, i händelse av ett strömavbrott.

I sådana fall ska du dra ut kontakten ur eluttaget, ta bort 4 skruvskydden, ta bort skruvarna och öppna den främre luckan. Anslut sedan backup batteriets kontakt till PCB kortet där det står BAT1.



Ändra läget


STEP-HEAR™ basenheten innehåller en bygel som sätts som standard till ett "inget batteri"-läge. För att ändra läge

från en "Inget batteri" till ett "Med batteri" läge, ställ in bygeln enligt följande:

Bygeln har 3 stift. Som standard (Inget batteri läge) kommer bygeln att täcka de högra och mellersta stiftet. När du har anslutit batteribackup förpackningen, dra ut bygeln och flytta den till att omfatta vänster och mellersta stiftet.



Jumper position i ett "med batteri"-läge

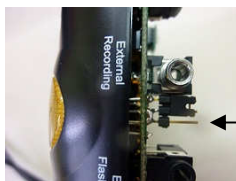

Jumper position i ett "Inget batteri"-läge (standard)

Sätt tillbaka och stäng den främre luckan och skruva de på 4 skruvarna och täck dem med de små skyddet.

Extern blix och summer

Det finns en möjlighet att köpa en extern blix och summerenhet. Denna enhet är idealisk för att ge leverantören ett förvarningsmeddelande genom ett surrande och blinkande, att en blind eller synskadad person kan behöva hans hjälp. Den externa Blix och Summer ska anslutas till uttaget som visas på diagrammet på sidan 4.



FELSÖKNING

Inga meddelanden spelas upp

- Se till att basen är ansluten till elnätet
- Se till att ett meddelande har registrerats

Det går inte att spela in ett meddelande

- Se till att inspelningen är inställd på ON
- Se till att basen är ansluten till elnätet

Ingen Vibration- och/eller Ljudsignal när Aktivatorn är inom räckhåll för Basenheten

- Ändra områdesinställningar
- Se till att basen är ansluten till elnätet

SÄKERHETSINFORMATION

Allmänt

Använd endast strömförsörjning som medföljer produkten.

Öppna inte enheten. Kontakta support för alla reparationer.

Rengöring

Rengör basen med en mjuk trasa. Använd aldrig polish eller rengöringsmedel - de kan skada ytan eller elektronik på insidan.

Miljö

Se alltid till att det finns ett fritt flöde av luft över ytorna i basenheten.

Utsätt inte produkten för brand eller andra farliga förhållanden.

GARANTI (EU)

Från det ögonblick du har köpt STEP-HEAR™-produkten, gäller STEP-HEAR™ garantin i ett år. Under denna tid, är alla reparationer eller byten (efter vårt gottfinnande) gratis. Om du får problem så kontakta vår support eller besök vår webbplats på <http://www.icap.nu> eller www.step-hear.com. Garantin täcker inte olyckor, försumlighet eller brott i några delar. Produkten får inte manipuleras eller tas isär av någon som inte är en auktoriserad STEP-HEAR™ representant. STEP-HEAR™ garanti begränsar inte på något sätt dina lagliga rättigheter.

VIKTIGT: DITT KVITTO ÄR EN DEL AV DIN GARANTI och skall sparas och produceras i vid garantifall.

Observera: Garantin gäller ENDAST INOM
EUROPEISKA UNIONEN

IC 10183A



13



Elektrisk anslutning: Apparaten (SH-200) är utformad för att användas från ett 100-230V 50/60Hz nät. (Klassificerade som "farlig spänning" enligt EN60950 standard). Apparaten innefattar inte en integrerad power on/off knapp. För att koppla bort strömmen, stäng antingen av på eluttag eller koppla ur strömadaptern. När du installerar apparaten, se till att uttaget är lätt tillgänglig.

Deklaration: Step-Hear förklarar härmed att denna SH-200 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

En kopia av försäkran om överensstämmelse med de väsentliga kraven i 1999/5/EC kan hittas på

www.step-hear.com

GUARANTEE (USA)

STEP-HEAR Ltd warrants the STEP-HEAR product against any defect in materials or workmanship for the period of one year from the date of purchase.

Should you experience a problem, contact our customer service department.

Be sure to save your sales receipt as proof of purchase date should you need warranty service.

Within a period of one year from purchase date, STEP-HEAR Ltd will repair or replace (at our discretion) your STEP-HEAR product at no cost, if a defect in materials or workmanship is found. If we elect to replace your STEP-HEAR product, we may replace it with a new or reconditioned product of the same or similar design.

Repair or replacement will be warranted for a period of 90 days or the remaining time on the original warranty, whichever is longer.

The warranty does not cover damage caused by vandalism, accident negligence, shipping damage, failure to follow instructions, misuse, fire, floods, use of incompatible accessories or Acts of God. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized STEP-HEAR representative. The STEP-HEAR guarantee in no way limits your legal rights

STEP-HEAR Ltd shall not be responsible for loss of time, inconvenience, property damage or any other accidental or consequential damages caused by your STEP-HEAR product

Warranty service is available only with proof of purchase.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR WARRANTY AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

For product support and help visit our website: www.step-hear.com

Or contact our representative in **North America**:

2288A Queen Street East
Toronto, ON M4E1G6, Canada
T: 347.482.1557
F: 801.760.9791

IC Declaration (Canada)

This device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Materialåtervinning

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) har införts för att de berörda produkterna i slutet av sin livslängd återvinns på bästa sätt.

När produkten slutat användas, ska du inte lägga den i din soptunna.

Använd ett av följande alternativ:

- Ta ur batterierna och lägg dem i en lämplig WEEE återvinning. Deponera produkten i en lämplig WEEE återvinning.
- Eller lämna den gamla produkten till återförsäljaren. Om du köper en ny, bör de acceptera det.

Alltså, om du respekterar dessa instruktioner skyddar du människors hälsa och miljön.

STEP-HEAR
GUIDING YOUR WAY



För support och hjälp besök vår webbplats på
www.icap.nu eller www.step-hear.com

UG SH-200-FEB12